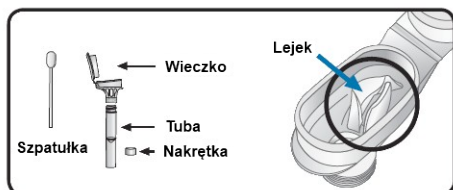


**Instrukcja obsługi  
zestawu do poboru próbki DNA**



**Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją.**

**Środki ostrożności:**

- Nie odrywać folii ze zbiorniczka.
- W wypadku zamówienia więcej niż jednego zestawu nie stosować zamiennie ich części.
- Po każdym użyciu szpatułki sprawdzić gąbkę pod kątem uszkodzenia. W wypadku zużycia użyć drugiej szpatułki.
- Nie używać innych szpatulek, niż dołączone do zestawu.

**Przygotowanie do pobrania:**

- 30 minut przed pobraniem próbki nie przyjmować posiłków, napojów, nie palić tytoniu i nie żuć gumy do żucia.
- Probant\* powinien znajdować się w pozycji wyprostowanej podczas pobrania.
- Cały proces trwa około 15 minut.

**Zastosowanie:**

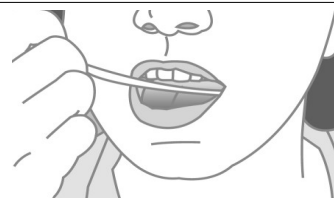
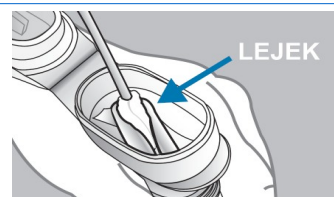

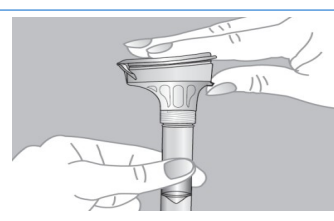
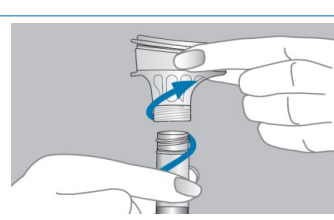
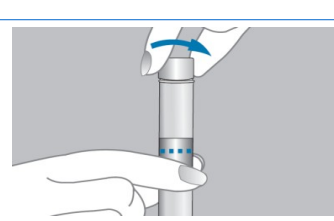
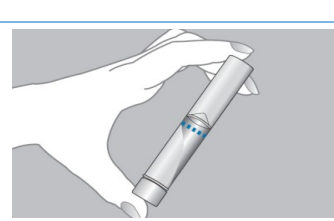
Produkt przystosowany do bezpiecznego poboru ludzkiej śliny.

**Ostrzeżenia:**

- Ryzyko uduszenia stanowią:
  - mała nakrętka dołączona do zestawu,
  - foliowe opakowanie ze szpatułką.
- Należy zachować ostrożność podczas umieszczania szpatułki w jamie ustnej probanta\*.
- Pobranie przez opiekuna:
  - nie pozostawiać probanta\* bez opieki.
  - Probant nie powinien sam obchodzić się ze szpatułką, nakrętką czy opakowaniem.
- W razie kontaktu z oczami lub skórą, natychmiast przemyć wodą. Nie połykać płynu.

**Przechowywać w temperaturze 15 do 30°C.**

**Pobór próbki DNA– Krok po kroku**

<p><b>1</b></p> 	<p>Końcówkę szpatułki z gąbką włożyć do jamy ustnej i ostrożnie poruszać wzdłuż dziąseł i po wewnętrznej stronie policzka przez około 30 sekund, aby nabrać możliwie jak najwięcej śliny.</p>
<p><b>2</b></p> 	<p>Gąbkę nasączoną śliną włożyć w charakterystyczny lejek w kształcie litery „V” i wycisnąć ślinę okręcając i dociskając szpatułkę do ścianek lejka. Ślina powinna spłynąć do tuby.</p>
<p><b>3</b></p> 	<p>Powtarzać kroki od 1 do 2 do momentu, kiedy poziom śliny w tubie osiągnie poziom czarnej linii. Przed każdym wprowadzeniem szpatułki do ust, sprawdzić stan gąbki. W wypadku zużycia użyć drugiej szpatułki. W celu pozbycia się bąbelków powietrza ze śliny, postukać delikatnie tubą o twardą i stabilną powierzchnię.</p>
<p><b>4</b></p> 	<p>Trzymając tubę jedną ręką, drugą docisnąć zdecydowanie wieczko, aż do usłyszenia głośnego kliknięcia. Płyn z wieczka zostanie przelany do tuby i wymieszany ze śliną. Upewnić się, że wieczko jest szczelnie zamknięte.</p>
<p><b>5</b></p> 	<p>Trzymając tubę pionowo, odkręcić, a następnie usunąć lejek z wieczkiem.</p>
<p><b>6</b></p> 	<p>Szczelnie zakręcić tubę nakrętką dołączoną do zestawu.</p>
<p><b>7</b></p> 	<p>Wymieszać zawartość tuby potrząsając przez 5 sekund. Szczelnie zamkniętą i zabezpieczoną przed rozlaniem tubę <b>przesłać na adres:</b> Europejski Bank DNA Sp. z o.o., ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław.</p>

\*Probant – osoba, od której pobierana jest próbka materiału genetycznego.